

Så här inhalerar du med **PARI LC SPRINT®** Nebulisator



1

Tvätta händerna noggrant före varje inhalation.



2a

Sätt på munstycke eller mask på nebulisatorn.



2b

Vid användning av en BABY-mask, använd BABY-vinkeln.

Rikta in maskens position efter babys läge.



3

Anslut nebulisatorn och kompressorn med anslutningsslangen.

Anslut kompressorn till strömförsörjningen.



4

Öppna locket, fyll i inhalationslösningen, stäng locket.



5a

Sitt upprätt och avslappnad. Sätt på enheten.

Ta munstycket mellan tänderna och stäng det med läpparna.



5b

Vid användning av en mask: Håll nebulisatorn i vertikalt läge.

Masken måste sitta tätt mot ansiktet.



6

Andas in djupt och långsamt.

Vid för snabb inandning skapar det integrerade PIF-Control System ett motstånd. Så snart du märker detta, andas in långsammare.

Läkemedlet är förbrukat när man hör en förändring i ljudet från nebulisatorn.



7

Stäng av enheten.

Ta bort nebulisatorn från slangen. För att torka slangen, sätt på enheten igen.

För att koppla bort strömmen: Dra ut stickkontakten.

Hygien och underhåll

PARI LC SPRINT® Nebulisator



1 Rengöring

... efter varje användning.

Demontera nebulisatorn i enskilda delar och förskölj under rinnande dricksvatten. Rengör enskilda delar i varmt dricksvatten med diskmedel (exponeringstid: minst 5 minuter), skölj sedan noggrant under rinnande dricksvatten.



2 Desinfektion

... en gång i veckan.

I en tillräcklig mängd kokande vatten (minst 5 minuter)

eller

i en kommersiellt tillgänglig termisk desinfektionsanordning (t.ex. för nappflaskor) i minst 6 minuter.



3 Torkning

Placera efter varje rengöring och/ eller desinfektion, enskilda delar på en torr, ren och absorberande yta.



4 Förvaring

Förvara delar på en torr, dammfri plats.




5 Underhåll: minst en gång per år

Byt nebulisator, anslutnings slang och luftfilter (PARI Year Packs). Om det finns skador eller smuts som inte kan rengöras, byt ut det tidigare vid behov.

En video om hantering och rengöring finns på www.pari.com.



Var noga med att följa bruksanvisningen för nebulisatorn och kompressorn. Den medföljer enheterna och innehåller en detaljerad beskrivning. Vid förlust kan respektive bruksanvisning hämtas på www.pari.com eller efterfrågas på +49 (0) 8151 279 220.

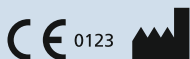

PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY
T: +49 (0) 8151 279 220
E: export@pari.de
www.pari.com

Kontakt:



Timik AB
Website: www.timik.se
Mail: order@timik.se